

 Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.



NOTE:

- 1) Non toccare, inserire o estrarre il cavo di alimentazione con le mani bagnate:
 - 2) Non usare spine danneggiate o prese allentate.
 - 3) Questo prodotto è dotato di circuito elettronico di protezione.
 - 4) Non ostruire le aperture di aerazione nella parte inferiore del prodotto.
 - 5) Non pulire quando l'apparecchio è acceso.
 - 6) Scollegare immediatamente l'alimentazione in caso, durante l'uso, si sentano rumori e/o odori sospetti provenire dall'apparecchio
 - 7) Scollegare l'alimentazione all'apparecchio in caso di non utilizzo e durante i temporali.
 - 8) In caso di malfunzionamento si prega di contattare la Carlo De Giorgi srl e descrivere il problema dettagliatamente ai tecnici addetti all'assistenza, non aprire e non cercare di riparare l'apparecchio.
-  9) Il prodotto è adatto solo per uso interno.
- 10) Non utilizzare se la tensione è inferiore a 200 Volt o superiore a 240 Volt, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi e/o non funzionare correttamente.

CARATTERISTICHE DI BASE:

Voltaggio: 220Volt +/-10%

Frequenza: 50Hz

Potenza: 130W



Isolamento: apparecchio di Classe II



BREVE INTRODUZIONE:

Il prodotto funziona in alta frequenza e con campi magnetici alternati. L'utensile di metallo per modellare la cera verrà scaldato attraverso turbolenza di campi magnetici creati all'interno della bobina induttiva.

L'apparecchio ha una alta precisione di controllo gestito da microprocessore ed è equipaggiato con una sofisticata protezione automatica.

Riscalda senza fiamma (non utilizza gas) quindi è sicuro ed efficiente, ha un elevato risparmio di elettricità, grazie al circuito elettronico che spegne automaticamente l'emissione di campi magnetici quando non rileva più parti metalliche all'interno della bobina induttiva.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:

1) Collegare il cavo di alimentazione ed accendere l'interruttore posto nel retro dell'apparecchio, si illuminerà il led posto davanti di colore verde, ciò sta ad indicare che il dispositivo è in modalità di attesa.

2) quando l'utensile metallico viene posto al centro della bobina induttiva la spia cambia colore da verde a rosso, ciò evidenzia l'inizio del riscaldamento. Di solito per il corretto riscaldamento sono necessari da 1,5 a 3 secondi. Se si superano i 12 secondi l'apparecchio entra in protezione, questa condizione verrà segnalata dalla luce rossa che diventa intermittente, dopo 3 minuti l'apparecchio torna in condizioni normali automaticamente.

3) L'apparecchio è dotato di dispositivo per il raffreddamento composto da una piccola ventola gestito da microprocessore; entrerà in funzione in condizioni di stato di surriscaldamento e si fermerà automaticamente a raffreddamento ottenuto. Fare attenzione a non ostruire l'entrata e l'uscita dell'aria poste sotto l'apparecchio, in quanto il mancato raffreddamento può essere causa di malfunzionamenti e rotture della macchina.

4) La protezione in gomma che copre la bobina induttiva del riscaldatore viene utilizzata per raccogliere eventuale cera liquida colata dall'utensile metallico. La protezione può essere tolta in qualsiasi momento senza pericolo di scottarsi procedendo così alla sua pulizia. Per staccare l'eventuale cera solidificata al suo interno premere sulle pareti esterne della protezione, così si otterrà il distaccamento della cera solidificata dalla protezione, a questo punto è possibile riposizionarla all'interno della cavità della bobina induttiva;

5) Se durante il posizionamento dell'utensile nella cavità non si accende la spia rossa si dovrà procedere necessariamente alla regolazione del sensore di campo magnetico, questo a causa delle diverse dimensioni delle punte degli utensili.

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DEL SENSORE:

Accendere l'apparecchio, e dopo aver inserito la punta dell'utensile che si intende utilizzare ruotare lentamente la rotella che si trova in basso a destra dell'apparecchio verso il massimo e/o minimo della sensibilità (▲) per regolarne il rilevamento. Appena il led si accenderà di colore rosso estrarre la punta e controllare che la spia diventi di colore verde, a questo punto l'apparecchio è tarato per quell'utensile. Nel caso sia necessario, procedere con piccoli ritocchi della posizione del regolatore per ottimizzare la sensibilità di rilevamento.