



Polvere per profilassi

Manuale di istruzioni

The logo for PT-S3 is centered. It consists of the letters 'PT' in white on a red-to-white gradient background, followed by a hyphen and the letters 'S3' in white on a white-to-blue gradient background.

PT-S3

Leggere attentamente prima dell'uso.

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

Contenuti

1 Introduzione al prodotto	3
2 Modello e specifiche	3
3 Composizione principale	3
4 Destinazione d'uso	3
5 Metodo di funzionamento	3
6 Controindicazioni	4
7 Conservazione e durata di conservazione	4
8 Consigli per il trattamento	5
9 Precauzioni	5
10 Trasporto	5
11 Tutela dell'ambiente	5
12 Descrizione dei simboli	6
13 Rappresentante europeo autorizzato	6
14 Dichiarazioni	6

1 Introduzione al prodotto

La polvere per profilassi è destinata all'utilizzo in campo odontoiatrico, mediante i manipoli di lucidatura ad aria.

2 Modello e specifiche

Modello: PT-S3;

Specifiche: Granulometria media ~ 65µm

Granulometria media ~ 25µm

3 Composizione principale

Glicina, Silice amorfa.

4 Destinazione d'uso

La polvere per profilassi è destinata all'uso in odontoiatria con i dispositivi di lucidatura ad aria per rimuovere placca dentale, tartaro, macchie, biofilm paradontale, ecc. (In caso di specifica di granulometria media ~ 65 µm può essere utilizzata solo per le applicazioni sopra-gengivali).

5 Metodo di funzionamento

5.1 Prima di aprire il tappo agitare il flacone su e giù per circa 3-5 volte.

5.2 Aprire il tappo, quindi versare la quantità appropriata di polvere nel serbatoio della polvere del dispositivo per lucidatura ad aria in base alle condizioni orali del paziente, quindi serrare il tappo.

5.3 Utilizzare il dispositivo di lucidatura ad aria , allineando l'ugello del manipolo

al punto in cui il paziente necessita del trattamento; quindi iniziare il ridimensionamento.

6 Controindicazioni

6.1 I pazienti affetti da infezioni alle vie respiratorie (bronchite cronica o asma) non devono, in nessun caso, essere trattati con un dispositivo di lucidatura ad aria.

6.2 Il getto di aria e polvere potrebbe causare difficoltà nella respirazione.

6.3 Le persone predisposte potrebbero essere sensibili al glicocol. Se si dovessero osservare reazioni allergiche, interrompere l'uso del prodotto e rimuovere completamente la polvere dalla bocca.

6.4 Il trattamento delle tasche parodontali profonde potrebbe causare batteremia : si prega di applicare le restrizioni appropriate per il trattamento dei pazienti a rischio (livello di immunità generale ridotto, endocardite).

6.5 Non dirigere il getto di polvere verso otturazioni, corone o ponti in quanto questo potrebbe danneggiare i restauri.

7 Conservazione e durata di conservazione

7.1 Non conservare la polvere vicino a fonti di calore.

7.2 Condizioni di conservazione: conservare a temperatura ambiente, lontano da umidità e luce diretta.

7.3 Periodo di validità: due (2) anni dalla data di produzione.

7.4 Non utilizzare dopo la data di scadenza.

8 Consigli per il trattamento

- 8.1 Prima del trattamento potrebbe essere utile applicare vaselina sul labbro del paziente.
- 8.2 Pazienti e operatori devono indossare occhiali protettivi nel trattamento.
- 8.3 L'utente deve indossare una mascherina durante il trattamento.
- 8.4 Utilizzare l'aspiratore ad alta pressione del riunito per evitare la sospensione della polvere spruzzata durante il trattamento.

9 Precauzioni

- 9.1 Dopo il trattamento, non re-inserire la polvere rimanente dal trattamento nel flacone originario .
- 9.2 Dopo aver aperto il flacone della polvere, richiudere il tappo, serrandolo in modo da proteggere la polvere dall'umidità.
- 9.3 Quando il dispositivo di lucidatura ad aria non viene utilizzato per un lungo periodo, pulire il serbatoio della polvere per evitare che la polvere si agglomeri nei condotti, bloccando il dispositivo.

10 Trasporto

- 10.1 Evitare di mescolare con merci pericolose durante il trasporto.
- 10.2 Durante il trasporto, evitare l'esposizione a sole, pioggia e neve.

11 Tutela dell'ambiente

Questo prodotto non contiene ingredienti nocivi.
Può essere smaltito e distrutto in conformità alle normative locali.

12 Descrizione dei simboli



Fare riferimento alle istruzioni manuale / libretto illustrativo



Produttore



Data di produzione



Numero di lotto



Agitare prima dell'uso

Shake before use



Marcatura CE



Rappresentante autorizzato nella COMUNITÀ EUROPEA

13 Rappresentante europeo autorizzato



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

14 Dichiarazioni

Woodpecker si riserva tutti i diritti nel modificare i contenuti inerenti alla tecnologia del prodotto, accessori, manuale di istruzioni e confezione del prodotto, in qualsiasi momento senza preavviso.

Sito Web di scansione e accesso
per ulteriori informazioni



CARLO DE GIORGI

Via Tonale 1

20021 Baranzate - Milano

Tel 02 3561543

Fax 02 3561808

Web site: www.degiorgi.it

Mail: info@degiorgi.it



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Tel:

Europe Sales Dept.: +86-773-5873196

North/South America & Oceania Sales Dep.: +86-773-5873198

Asia & Africa Sales Dep.: +86-773-5855350 Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glwoodpecker.com>



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

ZMN-SM-216 V1.1-20210506